



PRZEZNACZENIE

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej dla osób przy schorzeniach mięśni i układu kostno-stawowego stopy i podudzia, schorzeniach naczyniowych i tętniczo-żylnych (niedokrwienie kończyn przy cukrzycy, chorobie Burgera i Raynauda) oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia się stóp i tak zwanych „zimnych stopach”.

UŻYTKOWANIE

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu ciepłego. Wyroby poprzez ogrzanie i delikatny masaż pobudzają zakończenia nerwowe, poprawiają działanie mięśni, przyspieszają zanikanie obrzęków, łagodzą dolegliwości sztywności stawowej i pourazowej. Zapobiegają rozwojowi grzybicy stóp. Służą do codziennego użytku.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
- Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

OSTRZEŻENIA

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran.

PRZEPIS PRANIA

- Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
- Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
- Suszyć w stanie rozwieszonym.
- Nie wirować.
- Nie prasować.
- Można czyścić chemicznie.



Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.